

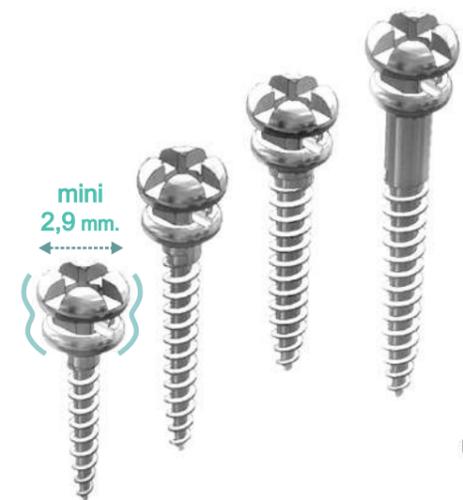



INDICACIONES

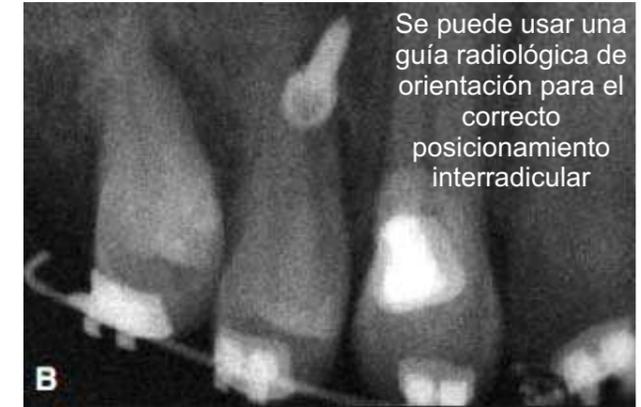

MICROTORNILLOS PARA ANCLAJE M.A.S. Miniscrew Anchorage System

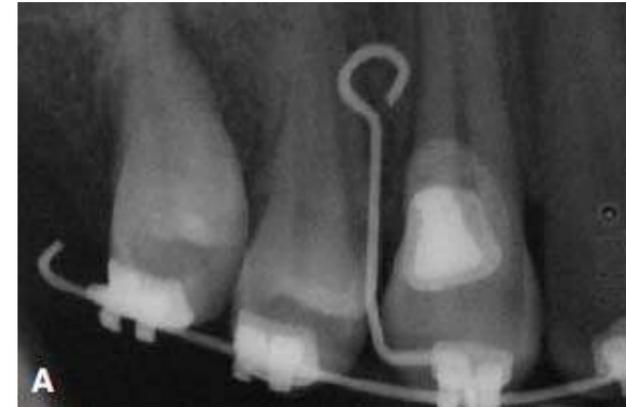

No es necesario fresar al ser microtornillos autoperforantes, En corticales duras, se puede perforar solamente 2 o 3 mm. de profundidad usando el "punzón-barrena" con la llave manual o de contraángulo.

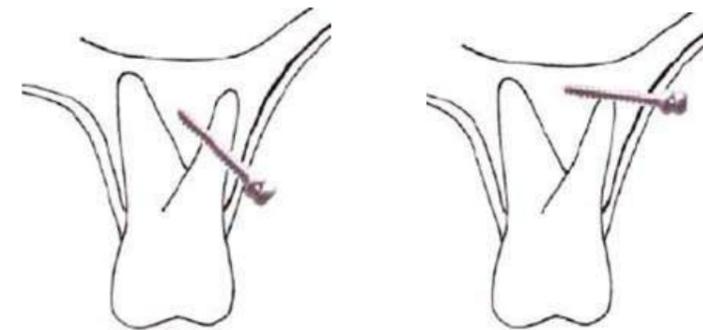

Se colocan preferentemente en la intersección entre mucosa libre y la adherida; entre raíces o en espacios postextracción.

Normalmente se debe inclinar 30-45% hacia hueso interradicular.

También se pueden colocar más perpendiculares para evitar el seno.

Se recomienda fuerza de inserción tope de 20N a bajas revoluciones.

Sistema simplificado con solo 4 tipos de microtornillos



OPCIONES DE MODO DE COLOCACIÓN

CONTRAANGULO



DIGITAL




MANUAL




LUGARES DE INSERCIÓN Y TIPO DE MICROTORNILLO RECOMENDADO

ZONA POSTERIOR: Existe mayor espacio entre el 2º premolar y el molar y más por palatino o lingual

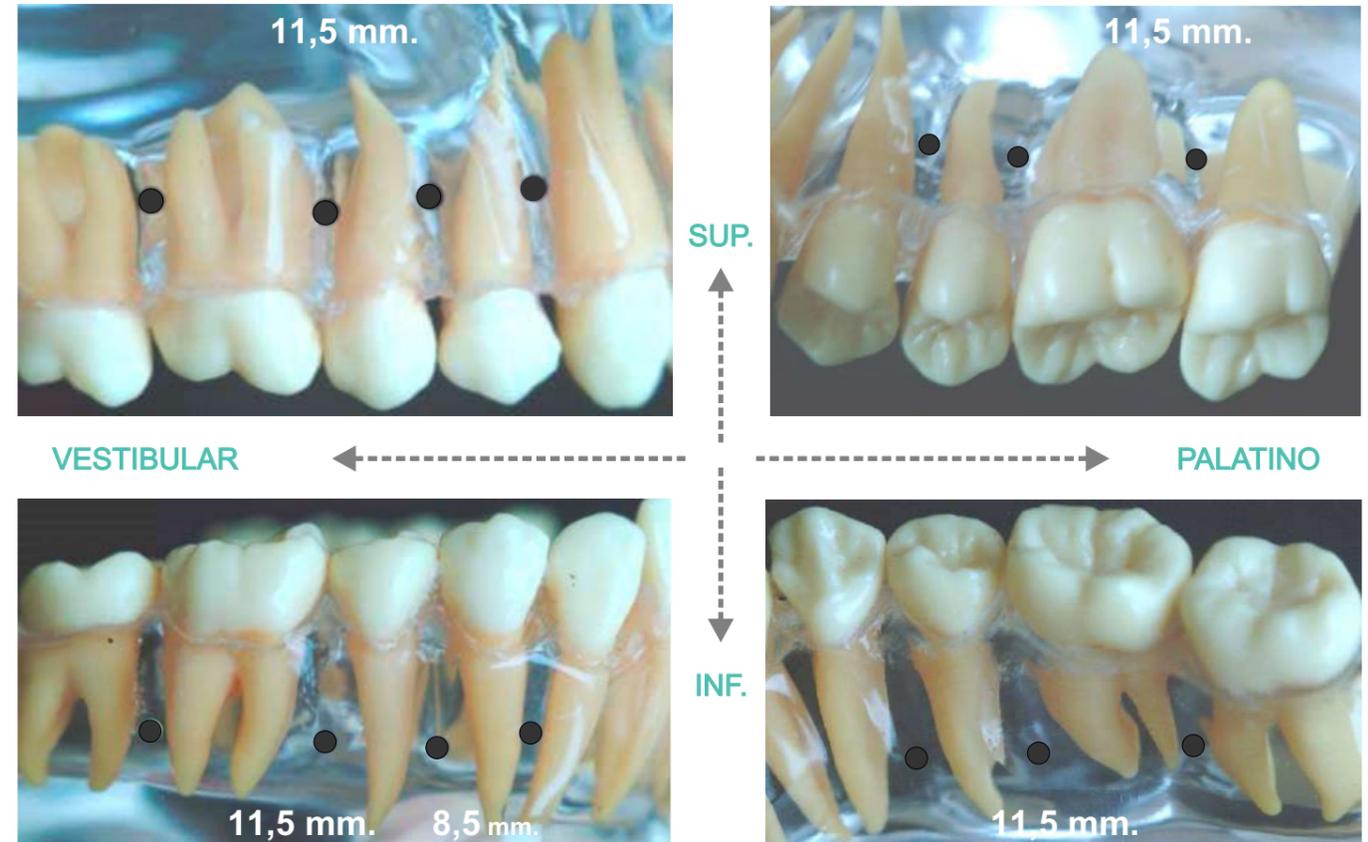

ZONA ANTERIOR

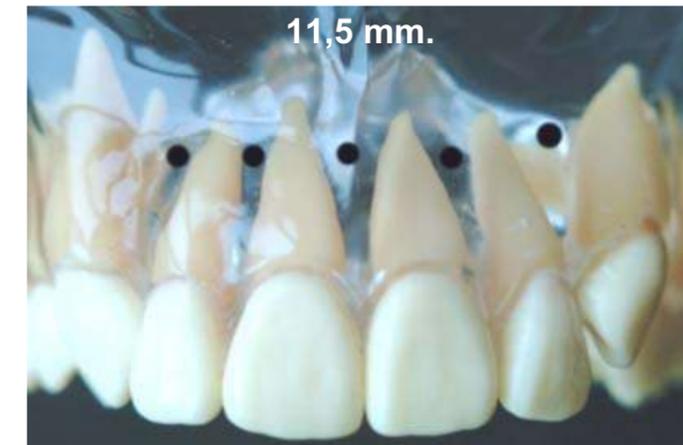

Objetivo: estabilidad primaria

1º usar el microtornillo universal de 10 mm. de largo y de 1,4 mm. de diámetro.

Si no queda con estabilidad, retirarlo y usar el más grueso de 1,6.

